


1 Umfang messen und Größe auswählen

EXOS™ Größe	Handumfang in cm
XXXS	14,5 - 16,5
XXS	16,5 - 18,5
XS	18,5 - 20,0
S	20,0 - 23,0
M	23,0 - 25,5
L	25,5 - 28,0
XL	> 28

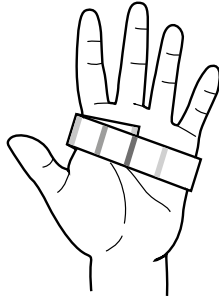

EXOS™-Maßband® zwischen Daumen und Zeigefinger anlegen und Orthesengröße ablesen. Alternativ mit handelsüblichen Maßband den Handumfang messen und Orthesengröße auswählen.

2 Vorbereiten



BOA®-Kabelzug komplett ausziehen und Orthese auseinander klappen.


3 Erwärmen

1. Lesen Sie vor der Verwendung einer EXOS™-Orthese die Produkthinweise durch.
2. Stellen Sie die Ofentemperatur zwischen MED und HI ein. Der Ofen muss nicht vorgeheizt werden.
3. Setzen Sie den Zeitregler auf 3-5 Minuten. Siehe hierzu Produkthinweise für empfohlene Erwärmungszeit je Produkt und legen Sie die Orthese in den Ofen.
4. Nach dem Ertönen des Signals EXOS™-Orthese aus dem Ofen entnehmen.



WARNUNG: EXOS™-Orthesen dürfen nicht länger als 15 Minuten erwärmt werden.

4 Anpassen

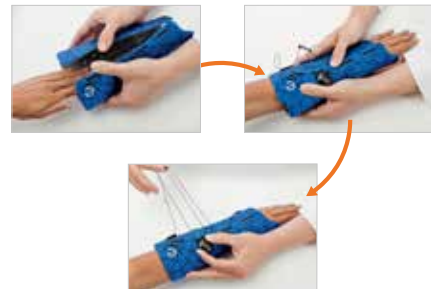

1. Dem Patienten die geöffnete EXOS™ überziehen.
2. EXOS™ individuell anformen.
3. Zum Schluss mit dem BOA® Verschlussystem die bedarfsgerechte Kompression einstellen. Um Druckstellen zu vermeiden, sollte die Kompression nicht zu stark eingestellt werden.

5 Patientengebrauchsanweisung übergeben



WICHTIG:

- Im Besonderen auf die Reinigungs- und Pflegehinweise in der Gebrauchsanleitung und Patienteninformation hinweisen.
- Beides dem Patienten übergeben.



WEITERE INFORMATIONEN RUND UM EXOS™

www.exos-orthesen.de

HABEN SIE FRAGEN ZU EXOS™?
Kontaktieren Sie unser Service-Team:

Telefon: 0180 1 676 333

E-Mail: orthopaedietechnik@DJOglobal.com